




Северная Столица

220012, г. Минск, ул. Сурганова 7А, пом.
120
УНН 192465298
тел/факс: 240-50-05
моб: +375293260403 (Velcom)
+375336600206 (MTS)

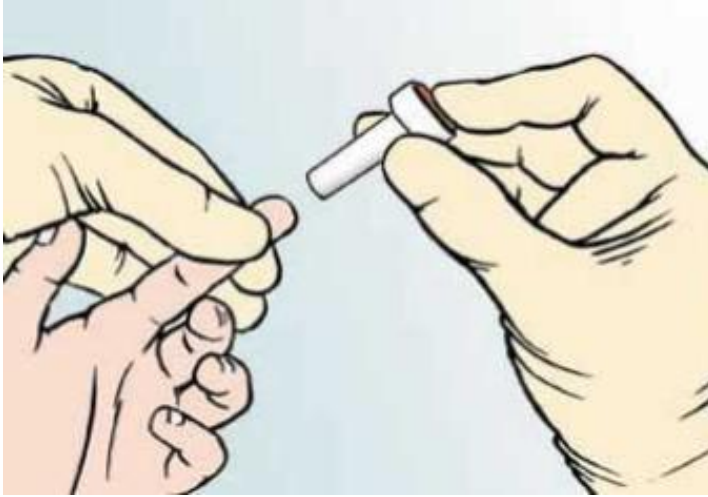

1. В крышку пробирки вставляется капилляр.
2. С помощью автоматического ланцета или обычного скарификатора делается разрез на подушечке пальца.
3. Кровь собирается в пробирку с помощью капилляра - под действием капиллярного эффекта.
4. Капилляр удаляется из крышки, при этом клапан крышки автоматически закрывается.
5. Пробирка аккуратно переворачивается вокруг своей оси 8-10 раз для лучшего смешения крови с реагентом.
6. После нанесения на этикетку данных пациента, пробирка готова к дальнейшему использованию.