










Северная Столица

220012, г. Минск, ул. Сурганова 7А, пом.
120
УНН 192465298
тел/факс: 240-50-05
моб: +375293260403 (Velcom)
+375336600206 (MTS)

Последовательность заполнения пробирок

Цветовой код	Число перемешиваний	Область применения	Химические наполнители
Пластиковые Голубой 	3-4 раза	Исследование коагуляции	Цитрат натрия
Пластиковые Черный 	8-10 раз	Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)	Цитрат натрия
Пластиковые Желтый 	5-6 раз	Исследование сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии	Активатор свертывания и разделительный гель
Пластиковые Красный 	5-6 раз	Исследование сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии	Активатор свертывания
Пластиковые Зеленый 	8-10 раз	Исследование плазмы в клинической химии, иммунологии	Гепарин (лития/натрия)
Пластиковые Фиолетовый 	8-10 раз	Гематологические исследования цельной крови	ЭДТА (К2/К3)
Пластиковые Серый 	8-10 раз	Исследования глюкозы	Фторид натрия / оксалат калия Литий йодоацетат / литий гепарин